


## Kurzanleitung

### RZ153+ Serie **CARDIO ID+**<sup>TM</sup> Rekorder einstellen


#### Neuer Patient:

- ♥ eine frische Mignon (AA, LR6) Alkaline Batterie einlegen.
- ♥ eine formatiert CompactFlash - Karte einlegen. (Achtung! Karte wird automatisch gelöscht!)
- ♥ Patientenkabel fest mit Rekorder verbunden und ohne Schaden?
- ♥ Mit „Enter“ -Knopf Gerät einschalten.

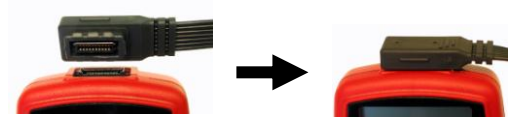




Das Fenster für die Patienten - ID erscheint.

- ♥ Zum Bewegen im Fenster dient der „Funktion“ Knopf. Drücken von  $\leftarrow$ ,  $\rightarrow$ ,  $\uparrow$  und  $\downarrow$  bewegt die Markierung an den gewünschten Ort. Mit dem  $\leftarrow$  „Enter“ - Knopf bestätigen Sie die Auswahl. Stellen Sie nun mit den  $\leftarrow$  und  $\rightarrow$  Tasten die Patienten - ID ein. Mit  $\leftarrow$  „Enter“ übernehmen Sie die Auswahl.
- ♥ Drücken Sie danach die  $\downarrow$  Taste und Sie kommen in die zweite Zeile. Mit „OK“ bestätigen Sie die Patienten - ID und können das Fenster verlassen. Mit „Zurück“ können Sie sie wieder ändern.
- ♥ Drücken Sie die  $\rightarrow$  Taste, um ins nächste Fenster zu gelangen. „Kanal 1“ zeigt Ihnen das EKG. Sie prüfen damit die Qualität der Anlage.
- ♥ Auf dieselbe Weise prüfen Sie den Kanal 2 und 3.
- ♥ Mit  $\uparrow$  und  $\downarrow$  können Sie die Verstärkung ändern (0,5\*, 1\* und 2\*). Diese Änderung gilt für alle drei Kanäle gleich.
- ♥ Drücken Sie nochmals die  $\rightarrow$  Taste und Sie kommen zum „Beginnen“ -Fenster.
- ♥ Drücken Sie den  $\leftarrow$  „Enter“ -Knopf und die Aufzeichnung beginnt.
- ♥ Während der Aufzeichnung zeigt der Cardio ID+ die aktuelle Zeit und die verbleibende Zeit für das Langzeit - EKG an.


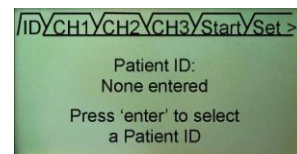


Function Enter

#### Patient ID

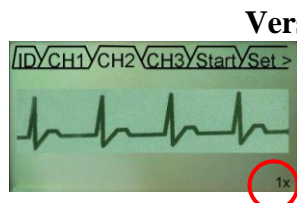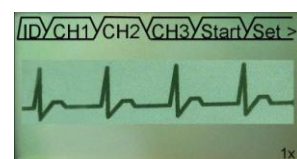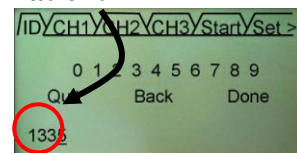



Verst

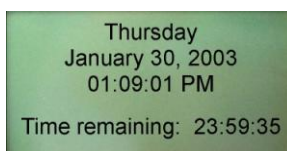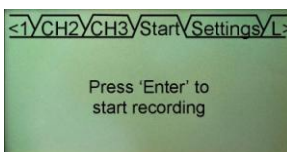

Bitte wenden ↓


## Die Einstellungen des Cardio ID+ ändern:

- ♥ Drücken Sie die → Taste bis zum Fenster „Einstellungen“.
- ♥ Drücken Sie den ↵ „Enter“-Knopf. Wählen Sie mit den Tasten ↑ und ↓ die Zeile in der etwas geändert werden soll. Mit Tasten ← und → ändern Sie den Eintrag. Mit dem ↵ „Enter“-Knopf übernehmen Sie die Änderungen.
- ♥ Auch Datum und Uhrzeit ändern Sie so.

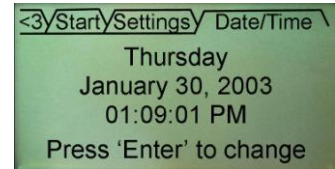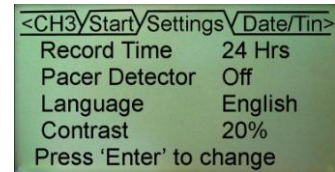

## Vorzeitiges Ende der Aufnahme:

- ♥ Wenn die Aufnahme vor der eingestellten Aufnahmedauer beendet werden soll, muss die Aufnahme manuell beendet werden.
- ♥ Drücken Sie dazu die ← Taste und den ↵ „Enter“-Knopf gleichzeitig und halten Sie sie für min 3 Sekunden gedrückt.

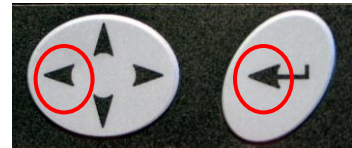

## WARNUNG:

- ♥ Wenn Sie den vorherigen Punkt nicht beachten, kann dies zum Verlust der Aufzeichnung führen.
- ♥ Die Schrittmacher-Erkennung ist immer abgeschaltet. Sie muss einzeln eingeschaltet werden.
- ♥ Die Aufnahmezeit beträgt immer 24 Stunden. Sie muss für jeden 2 Tage -Test eingestellt werden.

## Anlegeschemata:

