
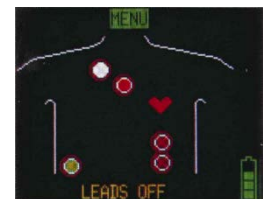


## Kurzanleitung für Scottcare Chroma Rekorder

### Vorbereitung des Rekorders und Start der Aufnahme

1. Frische AAA Micro Batterie einlegen
2. Patientenkabel mit dem Rekorder verbinden
3. Wenn noch Daten vom letzten Patienten gespeichert sind, fordert der Rekorder sie auf die Daten zu löschen oder herunterzuladen. Nachdem Sie löschen gedrückt haben, erscheint das Hauptmenü mit den 6 Icons.
4. Benutzen Sie die Pfeiltasten, um zum Patienten Icon zu kommen und drücken Sie dann die Enter Taste.
5. Um den Rekorder starten zu können, müssen Sie mindestens die Patienten ID( Patienten Nummer in Ihrer Praxissoftware) eingeben. Alle anderen Angaben sind optional.
6. Bestätigen Sie die Patienten Nummer mit Ok und gehen sie mit der Pfeiltaste nach rechts wieder zurück ins Hauptmenü.
7. Gehen sie mit der Pfeiltaste auf das dritte Icon in der oberen Reihe und drücken Sie Enter
8. Hier können Sie die richtige Anlage der Elektroden überprüfen. Zum Zurückkehren ins Hauptmenü drücken Sie Enter.
9. Gehen sie mit der Pfeiltaste auf das EKG Icon und drücken Sie Enter
10. Überprüfen Sie die Aufzeichnung der drei Kanäle. Mit der Pfeiltaste nach rechts können Sie die Kanäle wechseln. Gehen sie mit der Pfeiltaste ganz nach rechts auf Menü, um ins Hauptmenü zurückzukehren.
11. Drücken Sie jetzt das Start Icon, um die Aufzeichnung zu beginnen.

Alle anderen Einstellungen sind schon voreingestellt.

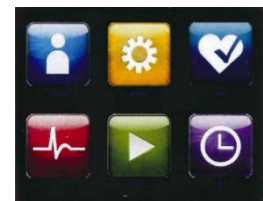

### Standard Einstellungen:

Aufnahme Zeit:	24 Stunden
Schrittmacher Erkennung:	Aus
Sprache:	Deutsch
Auflösung:	12 bit
Sampling Rate:	256 Hz
Beeper:	An
Stromsparen:	Aus
Schrittmacher Empfindlichkeit:	Niedrig

### Achtung

**Bei Kontakt mit Wasser kann das Gerät beschädigt werden..**

**Wasserschäden fallen nicht unter die Garantie**